

DGPa: un paso más cerca de un embarazo sano

Cuando uno se somete a un tratamiento para la esterilidad, quiere pensar que será exitoso. Es por ello que muchas familias incorporan el diagnóstico genético preimplantatorio de aneuploidía (DGPa, también conocido como cribado genético preimplantatorio [CGP]) como una parte estándar de su plan de tratamiento de fecundación in vitro (FIV). El diagnóstico genético preimplantatorio de aneuploidía (DGPa) de Invitae es un estudio avanzado que puede ayudarlo a encontrar el camino al embarazo.

Una parte importante de la FIV

El DGPa es una manera de identificar embriones con la cantidad correcta de material cromosómico para mejorar las posibilidades de un embarazo exitoso.

Cuando un embrión tiene cromosomas o segmentos cromosómicos adicionales o faltantes se presenta una afección conocida como aneuploidía. La mayoría de los embriones aneuploides no llegan a un parto de feto vivo sano: muchos derivan en abortos espontáneos, algunos no se implantan en el útero y otros dan como resultado un bebé con anomalías congénitas, discapacidad intelectual y/u otros problemas de salud. La aneuploidía se presenta en todos los grupos etarios, pero una vez que la mujer alcanza los 35 años, la proporción de embriones aneuploides aumenta rápidamente.

NOTAS:

Comience a conversar

Tenga una conversación con el médico a cargo de su FIV. Juntos pueden decidir que el DGPa podría ayudar a mejorar las posibilidades de un embarazo exitoso.

Si decide seguir con el DGPa y tiene preguntas sobre sus resultados, nuestros asesores genéticos pueden ayudarlo. Los asesores genéticos son proveedores de atención médica específicamente capacitados en genética médica; son expertos en ayudar a las personas a comprender lo que significan los resultados de sus pruebas genéticas. Para programar una sesión de asesoramiento genético posterior al estudio, visite el sitio www.invitae.com/patients/genetic-counseling o llame por teléfono al 800-436-3037.*

*Solo para asesoramiento posterior al estudio. Disponible únicamente en los EE. UU. y Canadá.

Precio

Si bien el diagnóstico genético preimplantatorio generalmente no está cubierto por la mayoría de los proveedores de seguros, Invitae ofrece un precio de pago asequible para el paciente a todos los pacientes que se realizan un DGPa.

¿Tiene preguntas? Visite www.invitae.com/contact-us para obtener una lista completa de la información de contacto.

ACERCA DE INVITAE

La misión de Invitae es proporcionar información genética a los consultorios médicos de todo el mundo para mejorar la calidad de la atención de la salud. Luchamos para que las pruebas sean asequibles y accesibles. El diagnóstico genético preimplantatorio de aneuploidía de Invitae ofrece a pacientes y médicos información que puede ayudarlos a tomar decisiones médicas mejor informadas.



INVITAE

Diagnóstico genético
preimplantatorio de
aneuploidía (DGPa)

¿Para quién es el DGPa?

El DGPa de Invitae puede marcar una diferencia real para muchas personas, incluidas las siguientes:

- Mujeres de más de 35 años de edad
- Mujeres que han tenido 1 o más abortos espontáneos*
- Mujeres que han tenido ciclos de FIV fallidos con anterioridad*
- Mujeres que han tenido un embarazo anterior con anomalía de un cromosoma completo*
- Parejas que se enfrentan a un factor de esterilidad masculina*
- Parejas que desean reducir la posibilidad de tener mellizos u otros embarazos múltiples
- Parejas interesadas en conocer el sexo de su embrión (opcional)


*Pregunte a su médico si el DGPa de Invitae es adecuado para usted según sus antecedentes médicos.



Edad materna y aneuploidía


Porcentajes de embriones con una cantidad anormal de cromosomas

Adaptado a partir de datos internos sobre más de 90.000 embriones, 2018.

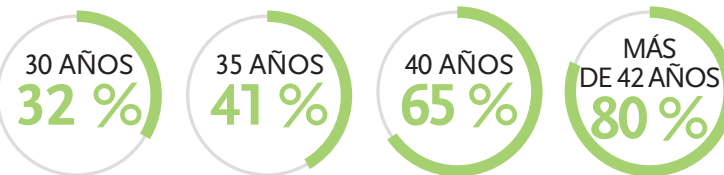

Cómo funciona el diagnóstico genético preimplantatorio de aneuploidía (DGPa) de Invitae

El proceso comienza una vez que usted y el médico a cargo de su FIV deciden juntos que el DGPa puede ayudarlo a mejorar las posibilidades de un embarazo exitoso.

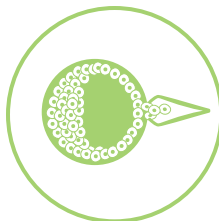

1. El equipo de fertilidad extrae las células de cada uno de los embriones en desarrollo (toma una biopsia) y envía las células a nuestro laboratorio; unas pocas células son suficientes.



2. Nuestro procedimiento analiza los 23 pares de cromosomas para identificar embriones normales* listos para la implantación. *Se comparten los resultados con su médico en un plazo de entre 5 y 7 días.*



3. En función de sus resultados, el equipo de fertilidad selecciona embriones sanos* para transferir, aumentando así las posibilidades de un embarazo exitoso.

*Normal y sano implica la cantidad esperada de cromosomas que indica el DGPa de Invitae.

